



Anleitung Testung




1. Entnehmen Sie den Teststreifen der Verpackung und legen ihn vor sich auf den Tisch.
2. Entnehmen Sie den Abstrichtupfer der Verpackung und führen es ca. 5 cm in ein Nasenloch ein, dann das Stäbchen 5 x drehen und im anderen Nasenloch wiederholen.

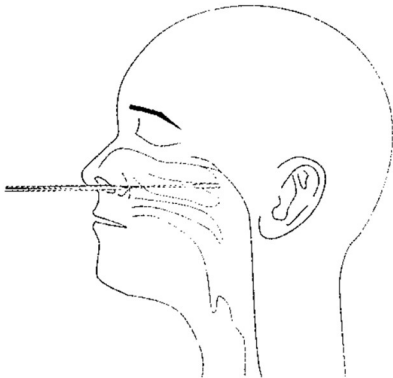


3. Ziehen sie die Schutzfolie von dem Röhrchen mit Extraktionspuffer ab und stecken den Abstrichtupfer hinein. Drehen Sie den Abstrichtupfer und drücken auf das untere Teil des Röhrchens damit sich das Sekret vom Tupfer löst. Beim Rausziehen des Tupfers drücken Sie das Röhrchen zusammen, damit der Tupfer nochmals abgestrichen wird. Setzen Sie die Spenderkappe auf das Röhrchen.

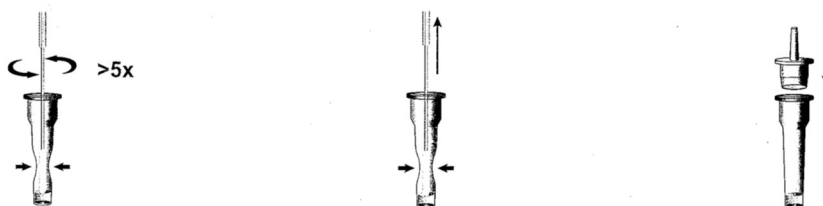

4. Geben Sie drei Tropfen in die runde Öffnung des Teststreifens. Lassen Sie den Test vor sich liegen (nicht kippen).

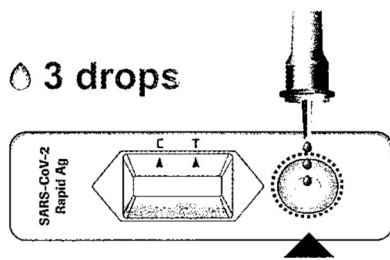


5. Nur nach 15 bis 30 Minuten kann das Ergebnis des Tests abgelesen werden.

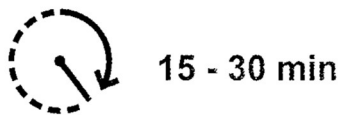

ACHTUNG: Nach mehr als 30 Minuten kann sich das Ergebnis verfälschen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Test nach ca. einer Stunde ein positives Ergebnis anzeigt.

Testergebnisse:

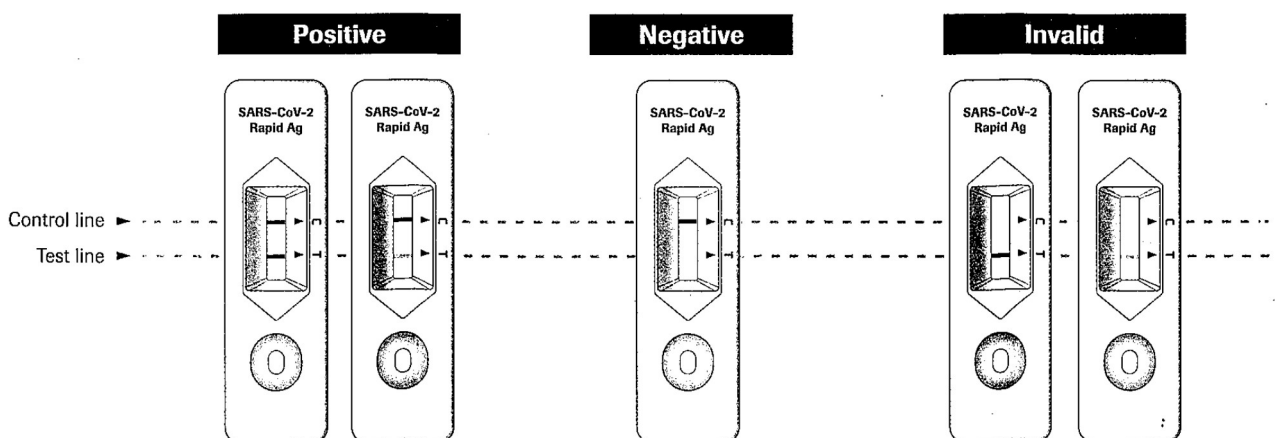

Sollte bei C (Control line) keine Linie angezeigt werden, wurde der Test nicht richtig durchgeführt.

Die Linie bei T (Test line) kann von leicht gräulich bis hin zu kräftig rot sein.